

### IPPV 対応カフ付き口腔咽頭エアウェイ

チューリップ エアウェイ (Tulip Airway®) は、プレホスピタルの現場において、使用経験がなくても患者に確実に挿入、気道確保や心肺蘇生に使える「第一選択のエアウェイ」の提供を目的に、英国の麻酔医 Dr. Amer Shaikh によって開発されました。




#### 適 応


- BLS (一次救命処置) での心肺蘇生から、全身麻酔における気道管理まで

#### 特 長


- 陽圧換気対応できる「世界最小」「低侵襲」「低刺激」なカフ付き口腔咽頭エアウェイ
- チューリップ GT (グデルタイプ) とチューリップ アドバンスの2種類
- GT (6 サイズ) は幼児から成人まで対応。アドバンスは 1 サイズで成人に対応
- エアウェイチューブ：
  - ・GT は、グデルエアウェイと同様の形状、広い開口部 (18.5×10mm)。
  - ・アドバンスは、マギルカーブ。
  - ・バイトブロック機能付き
- 15mm コネクタ
- 低圧大容量カフ：中咽頭部を確実にシール
- 一方弁

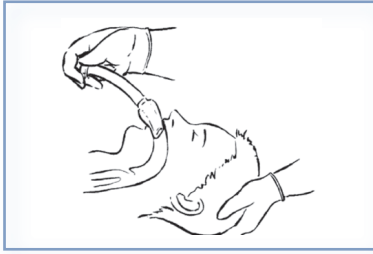

挿入前に、カフ全体にジェリーをしっかり塗布、コネクタ部の下方を握って、下唇に沿わせながら挿入します。

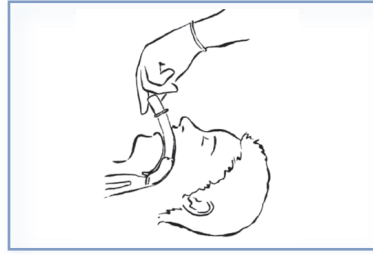

硬口蓋に沿ってスライドさせながら進めると、その先端を中咽頭部の後壁に保持できます。舌の背後の口腔から中咽頭のカーブは、保持した手を回転させて挿入します。

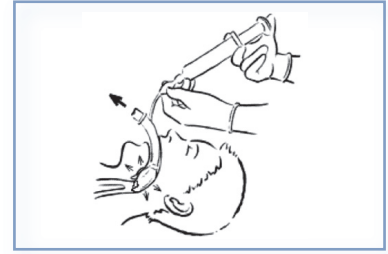

カフを膨らませる前に、エアウェイチューブのセンター部に印刷されたマークが上唇の中央にくるように保持します。60mL シリンジを使って、カフを十分な空気で膨らませます。患者が覚醒後に、カフから空気を抜いてチューブを抜去します。



チューリップ GT

チューリップ アドバンス



サイズ0 サイズ1 サイズ2 サイズ3 サイズ4 サイズ5

チューリップ GT

アドバンス

品番	品名	対象	コネクタ色	推奨カフ容量	包装単位	JAN コード
TGT-00	チューリップ GT サイズ0	5～20kg	青	30mL	40個/箱	4582425570345
TGT-01	チューリップ GT サイズ1	20～40kg	黄	40mL	40個/箱	4582425570352
TGT-02	チューリップ GT サイズ2	40～60kg	緑	40mL	30個/箱	4582425570369
TGT-03	チューリップ GT サイズ3	60～80kg	橙	50mL	30個/箱	4582425570376
TGT-04	チューリップ GT サイズ4	80～100kg	赤	60mL	30個/箱	4582425570383
TGT-05	チューリップ GT サイズ5	100kg以上	透明	60mL	30個/箱	4582425570390
TRBO-05	チューリップ アドバンス・オーバル	40～100kg	透明	40～60mL	20個/箱	4582425570185

外国製造業者：

**Omnimate Enterprise Co., Ltd. (台湾)**

製造販売業者（製造販売元）：

**メディコノヴァス株式会社**

〒231-0006

神奈川県横浜市中区南仲通三丁目35番地

<http://www.mediconovus.co.jp/>